



YAYLA-MED CERRAHİ ÖNLÜK KULLANIM KILAVUZU

1. Amaç ve Kapsam

Bu kullanım talimatı, Yayla-Med tarafından üretilen steril olmayan cerrahi önlüklerin sağlık çalışanları tarafından doğru, güvenli ve hijyenik bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Belirlenen kurallara uygun kullanım, hem hasta güvenliğini hem de sağlık personelinin korunmasını hedefler.

Bu kılavuz;

- Ürünün tanımı ve özelliklerini,
- Giyme ve çıkarma aşamalarını,
- Kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususları,
- Saklama ve atık yönetimi süreçlerini kapsamaktadır.

2. Ürün Tanımı

Yayla-Med cerrahi önlükler; ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve diğer tıbbi müdahale alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler:

- Malzeme:** SSMMS veya Non-Woven kumaş
- Kullanım Türü:** Tek kullanımlık
- Sterilite:** steril değildir.
- Bağlama Sistemi:** Belden bağlamalı kuşak sistemi
- Koruma:** Vücut sıvılarına ve mikroorganizmalara karşı bariyer özelliği

3. Kullanım Talimatları

3.1 Giyme Talimatı

1. Önce ellerinizi uygun dezenfektan ile temizleyiniz.
2. Önlüğü paketinden çıkarırken yırtık veya hasar olmadığından emin olunuz.
3. Önlüğü ön kısmı size bakacak şekilde açınız.
4. Kollarınızı sırayla önlük kollarına geçirin.
5. Omuzları hizalayarak önlüğü düzgün bir şekilde yerleştiriniz.
6. Bel kuşaklarını arkadan öne doğru getirerek bağlayınız.

3.2 Çıkarma Talimatı

1. Ellerinizi kontamine olduğunda yeni eldiven giyiniz veya dezenfekte ediniz.
2. Bel kuşaklarını çözünüz.
3. Önlüğü önden arkaya doğru dikkatlice çıkarınız.
4. Yüzünüze veya steril olmayan bölgelere temas ettirmemeye özen gösteriniz.
5. Önlüğü yalnızca dış yüzeyinden tutarak tıbbi atık kutusuna atınız.

4. Dikkat Edilecek Hususlar

- Bu ürün **tek kullanımlıktır**, kesinlikle tekrar kullanılmaz.
- Yırtılmış, delinmiş veya sıvı ile temas etmiş ürünler kullanılmamalıdır.
- Kullanım sırasında önlüğün bariyer özelliğini bozacak keskin aletlerle temastan kaçınılmalıdır.
- Uygun beden seçilerek kullanım rahatlığı ve koruma düzeyi artırılmalıdır.

5. Saklama Koşulları

- Ürünler **kuru, serin ve temiz** ortamlarda saklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından, nemden ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Ambalajın bütünlüğü bozulmamış ürünler, üretim tarihinden itibaren son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

6. Atık Yönetimi

- Kullanım sonrası cerrahi önlükler, **tıbbi atık kutularına** atılmalıdır.

- Steril olmayan önlükler de dahil olmak üzere tüm kullanılmış ürünler **tek kullanımlık** olarak değerlendirilir.
 - Atıkların bertarafı, “**Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği**” ve kurum içi atık yönetimi prosedürlerine uygun olarak yapılmalıdır.
-

7. Güvenlik ve Hijyen

- Önlükler, sağlık çalışanlarını biyolojik risklere karşı korur ancak **tam koruma sağlamaz**; diğer kişisel koruyucu ekipmanlarla birlikte kullanılmalıdır.
 - Giyme ve çıkarma sırasında hijyen kurallarına uyulması enfeksiyon kontrolü açısından kritik öneme sahiptir.
 - Kullanım öncesi ve sonrası **el hijyeni** sağlanmalıdır.
-

8. İletişim ve Destek

Ürün hakkında detaylı bilgi, teknik destek veya geri bildirim için lütfen Yayla-Med müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Basım tarihi:01.11.2020

İletişim Bilgileri;

Yayla-Med Tıbbi Cihazlar Medikal ve Teknolojik Ürünler Tic. Ltd. Sti.
Mansuroğlu Mah. (Bucağı/Köyü) 295/1 Cad. Bina No:2A Bayraklı İzmir Türkiye
Telefon: +90 232 339 88 98
E-posta: yayla-med@hotmail.com
Web: www.yaylamed.com.tr