

Varisli damar

Tedavi

Retiküler, kollateral ve perforan damarlar, F Care Systems CR30i kateterleri ile tedavi edilebilir. Kateterler son derece esnektir, böylece damar yönünü kolayca takip ederler. Kateter, etrafında geliştirilmiş kaplama malzemesi sayesinde kolayca yerleştirilebilir. Yalıtılmamış ucu, yüksek frekanslı sinyali damar duvarına iletir. Bu damarın pıhtılaşmasına ve sonunda kaybolmasına neden olur.

Kateter sterilize bir el aygıtıyla yönlendirilir. Aygıtın tekerleği kaydırılarak kateter damara sokulur veya dışa çıkartılır.



CR30KAB


4 Adımlı İşlem




1. İntravenöz giriş iğnesini setten çıkartıp, damara yerleştirin.



2. Setin içindeki katateri giriş iğnesinden damara yerleştirin

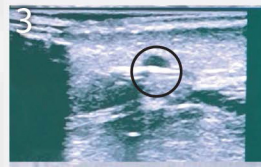

3. Ultrason yardımıyla katetere pozisyon verin.

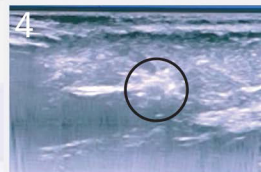

4. Damara RF sinyalini iletmek için pedalı iterken kateteri geri çekin ve termal reaksiyonu izleyin.

Klinik Çalışma

Kronik venöz ülserlerin iyileşmesinde yetersiz perforan venlerin radyofrekans ablasyonunun rolü.

Mansoura Üniversitesi
Mansoura Mısır

Dr M. Saad

İğneler ve kateterler

Avantajları

Hasta için

- Tedavi sırasında ve sonrasında ağrı oluşmaz
- Alerjik reaksiyon oluşmaz
- Kimyasal maddeye bağlı dermatolojik bir reaksiyon oluşmaz
- Fazlasıyla estetik bir görünüm sağlanır

Doktor için

- Kullanımı kolaydır
- Kalıcı oklüzyon
- Yarı steril ortam (özel uygulama)
- Vücutta kimyasal madde olmaz
- Kollateral, periferik ve perforan damarlar tedavi edilebilir

CR30KAB Teknik Özellikleri

Kateter

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • Uç Uzunluğu | 10mm |
| • Kateter Uzunluğu | 275mm |
| • Kateter çapı | 0.7mm |
| • İzolasyon materyali | PTFE |
| • Uç malzemesi | Paslanmaz |
| • Uzatma kablosu | Çelik 1m |

Giriş İğnesi

- | | |
|---------------------------|------|
| • İntravenöz Giriş İğnesi | 20 G |
| Çapı | |